

Spirometriinställningar i Cardio Perfect

Ställa in mätvärden spirometer:

Gå in i Cardio Perfect:

- # Arkiv (vänster högst upp i listan)
- # Inställningar
- # Spirometri
- # Parametrar

Spara endast mätvärdena FVC, FEV₁, FEV₁ %, SVC genom att bocka i kolumnerna mätvärden, sex parametrar och skrivare.

Alla andra bockar klickas bort.

- # OK (**Viktigt!** Annars sparas inte ändringarna)

Granskning av spirometrikurvor:

Gå in i Cardio Perfect:

- # All efforts (höger högst upp i listen), välj ”slutresultat” genom att klicka på pilen

Då referenser saknas på gamla spirometrier:

Gå in i Cardio Perfect:

- # Format vänster (högst upp i listen)
- # Omberäkna referensvärde, välj ”Hedenström/Solymar Com”
- # OK



=
klicka på